



Wohnraumrollator «Saljol» mit Vollausrstattung



Wohnraumrollator «Saljol» mit Vollausrstattung

Der Wohnraumrollator von Saljol hat eine Sitzfläche und passt, mit nur 51 cm an der schmalsten Seite, durch nahezu jede Tür. Er kann an jeder Stelle voll belastet werden ohne zu kippen. Das umfangreiche Zubehör macht den Wohnraumrollator zur vielseitigen Haushaltshilfe.

Highlights

- Vollausrstattung: Sitzbrett und Tablett mit Filzauflage, abnehmbare Kork-Handlaufpolster, Tasche, Bremsbügel in Rahmenfarbe
- Sturzprophylaxe für Zuhause
- Passt durch schmale Durchgänge und lässt sich auf der Stelle drehen



- Fortbewegen im Sitzen erlaubt
- Dient als fahrbarer Handlauf

Technische Daten

Wohnraumrollator	WR43	WR50	WR53	WR56
Empfohlen für Körpergröße	135–155 cm	145–165 cm	150–180 cm	170–200 cm
Max. Nutzergewicht	120 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Griffhöhe	78 cm	80 cm	86 cm	92 cm
Sitzhöhe	43 cm	50 cm	53 cm	56 cm
Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Breite oben	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Länge	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm
Abstand zw. den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Gewicht ohne Zubehör	9.40 kg	9.60 kg	9.80 kg	10.00 kg

Premium Qualität mit Vollausrüstung

Jede Menge Extras – und alles im Lieferumfang enthalten!

Bei Ihrem Saljol Wohnraumrollator soll es Ihnen an nichts fehlen! Denn bei ihm ist wirklich alles dabei...

Das Gesamtpaket umfasst Ihren Premium-Wohnraumrollator, ein Sitzbrett mit Filzauflage, ein Tablett mit Filzauflage, drei abnehmbare Kork-Handlaufpolster, eine Tasche und einen Bremsbügel in passender Rahmenfarbe.

Auf dem komfortablen, mit Filzauflage gepolsterten Sitzbrett können Sie sich ausruhen oder sich sitzend durch die Räume schieben. Der Bremsbügel, der farblich auf den Rollatorrahmen abgestimmt ist, kann alternativ zu den Bremsgriffen verwendet werden. Die drei Kork- und Neopren-



Handlaufpolster am Griff bieten ein angenehmes Gefühl und sicheren Halt. Ihr Geschirr transportieren Sie dank des Tablett mit Filzauflage sicher, während Sie in der praktischen, abnehmbaren Tasche Ihre Alltagsgegenstände stets griffbereit haben.

Die abnehmbaren Griffpolster aus Korkstoff und Neopren bieten ein aussergewöhnlich angenehmes Gefühl. Das stossdämpfende und wärmespeichernde Material unterstützt die Beweglichkeit Ihrer Hände und Finger, besonders bei empfindlicher Haut. Mit ihren rutschhemmenden und schnelltrocknenden Eigenschaften sorgen die Polster auch bei Nässe für sicheren Halt.

Eine Sitzgelegenheit immer zur Hand? Wie genial! Der Saljol Wohnraumrollator macht's möglich. Dank des mitgelieferten Sitzbretts mit weichem Filzkissen können Sie bequem sitzen und sich sogar im Sitzen per Fussbewegung (trippelnd) sicher von Herd zu Kühlschrank und zurück bewegen – ideal für mehr Komfort und Selbstständigkeit im Alltag.

Das Brett lässt sich einfach einsetzen, entfernen oder hochklappen – für bequemes Sitzen und mehr Beinfreiheit beim Gehen.

Der Wohnraumrollator unterstützt Sie zuverlässig beim Transport von Alltagsgegenständen. Das stabile Tablett mit rutschhemmender Filzauflage bietet eine sichere Möglichkeit, Essen und Getränke zu servieren. Tassen und Teller bleiben an ihrem Platz. Für grössere Gegenstände wie Wäschekörbe oder Blumentöpfe dient das robuste Sitzbrett als praktische Abstellfläche. Die Hände fest am Rollator transportieren Sie alles mühelos und sicher von A nach B.

Das abnehmbare, farblich abgestimmte Täschchen sorgt dafür, dass persönliche Gegenstände wie Schlüssel, Handy oder Taschentücher stets griffbereit sind – auch wenn das Tablett aufgelegt ist. Sie können das Täschchen weiterhin verwenden, während Sie das Tablett zum Servieren nutzen.

Korkfarbene Hinweise markieren die wichtigsten Funktionen der Saljol Rollatoren

Die Hinweise an Ihrem Wohnraumrollator heben Produktfunktionen hervor, die Sie kennen sollten. Sie erkennen diese an den korkfarbenen Fähnchen. Probieren Sie es aus und machen Sie sich mit den jeweiligen Funktionen vertraut!

Wichtig: Entfernen Sie die Fähnchen bitte, bevor Sie Ihren Wohnraumrollator das erste Mal benutzen möchten.

Ihr neues Lieblingsstück für Ihr Zuhause



Ihre Sicherheit in den eigenen vier Wänden liegt uns am Herzen. Deshalb ist der Saljol Wohnraumrollator der perfekte praktische Helfer für zuhause. Er ist stabil, robust, wackelt nicht und lässt sich Ihren Bedürfnissen anpassen.

Sie haben die Wahl: Grössen und Farben des Wohnraumrollators

Den Wohnraumrollator gibt es in vier verschiedenen Grössen:

WR43 = Griffhöhe 78 cm; Sitzhöhe 43 cm; empfohlen für Körpergrösse 135–155 cm

WR50 = Griffhöhe 80 cm; Sitzhöhe 50 cm; empfohlen für Körpergrösse 145–165 cm

WR53 = Griffhöhe 86 cm; Sitzhöhe 53 cm; empfohlen für Körpergrösse 150–180 cm

WR56 = Griffhöhe 92 cm; Sitzhöhe 56 cm; empfohlen für Körpergrösse 170–200 cm

Der Wohnraumrollator ist erhältlich in zwei Farben:

- Champagne Gold (gold)
- Velvet Grey (grau)

So können Sie den Saljol Wohnraumrollator nutzen

Als Rollator für den Innenbereich

Genau wie ein Rollator für draussen lässt sich der Wohnraumrollator schieben, bremsen und zum Sitzen nutzen.

Als rollenden Assistenten

Dank zahlreichem Zubehör können Sie den Rollator nach Ihren Wünschen gestalten. Das mitgelieferte Tablett macht ihn zum Servierwagen, Zubehör wie ein Schrank zum Nachttisch oder ausgestattet mit Postersitz und Rückenrolle wird aus ihm ein bequemer Stuhl.

Als stabilen Handlauf

Sie können sich sicher von allen Seiten auf dem Rollator abstützen und durch die Wohnräume fahren. Handläufe oder Haltegriffe an den Wänden sind nicht mehr nötig.



Als fahrbaren Stuhl

Trippeln ist auf diesem Rollator erlaubt. Sie können sich bequem auf das Sitzbrett setzen und sich bei Bedarf mit den Füßen von A nach B schieben. Ideal zum Beispiel beim Essen zubereiten und Kochen.

Dadurch macht der Indoor Rollator Ihnen das Leben leichter

Für Personen, die nicht (mehr) die gleiche Kraft in beiden Händen haben, bietet der Wohnraumrollator ein ganz besonderes Plus: Einen Bremsbügel, der sich mit einer Hand betätigen lässt. Damit können Sie die Feststellbremse spielend leicht mit einer Hand aktivieren.

Natürlich kann der Rollator auch wie gewohnt mit beiden Händen an den zwei Bremsgriffen angehalten oder in Parkposition gebracht werden.

Die Bremsgriffe sind mit hautfreundlichem und rutschhemmendem Kork-TPE beschichtet, wodurch sie besser festzuhalten sind, selbst an heissen Tagen.

Der Wohnraumrollator hat ein im Rahmen integriertes Bremssystem, damit Sie nicht mit den Bremskabeln an Möbeln oder Türgriffen hängenbleiben.

Der Wohnraumrollator passt selbst durch sehr schmale Türrahmen. Wenn man ihn seitlich schiebt, ist er gerade mal 51 cm breit.

Er dreht auf der Stelle mit einem Wendekreis von nur 66 cm. So ist er selbst in engen Badezimmern und Schlafzimmern unschlagbar wendig.

Weiche, rutschhemmende Räder sorgen für ein angenehmes und sicheres Fahren, auch über kleinere Schwellen.

Die Zubehörelemente machen den Wohnraumrollator zu einem Schrank oder einem Servierwagen – ganz ohne Werkzeug oder Schrauben.

Der Wohnraumrollator - unterstützt Sie zuhause

Der neue Saljol Wohnraumrollator kann zwar nicht staubsaugen, aber ansonsten ist er die grösste



und zugleich vielseitig einsetzbare Hilfe für zuhause, die Sie sich vorstellen können! Auf die Fähigkeiten des Superhelden auf vier Rädern können Sie sich in jeder Alltagssituation verlassen. Wetten, dass Sie sich in mindestens einer der vier Situationen schon mal einen treuen Begleiter im Haushalt gewünscht haben:

1. Sie gehen oder stehen unsicher

Sie sind manchmal wackelig auf den Beinen und suchen Halt an Wänden und Möbelstücken? Oder gehört es schon zum Alltag, dass Sie sich an Möbelstücken entlanghandeln? Hier begleitet Sie der Wohnraumrollator als klassischer Rollator sicher von Zimmer zu Zimmer. Wie ein Fels in der Brandung steht er Ihnen zur Seite, wenn Sie im Rollator gehen oder am Rollator stehend Hausarbeiten erledigen.

Stabiler und belastbarer Freund

Sturzprophylaxe ist das Wichtigste, was ein Rollator – egal ob für Drinnen oder Draussen – bieten muss. Deshalb ist der Saljol Wohnraumrollator auch extrem stabil und belastbar bis 150 kg. Ausserdem können Sie sich von allen Seiten auf dem Rollator abstützen, ohne dass er kipzelt oder wackelt.

Beim Gehen dient er Ihnen als mobiler Handlauf, aber auch beim Aufstehen vom Stuhl, vom Sessel oder aus dem Bett können Sie sich an ihm festhalten und abstützen.

Achtung: Bitte aktivieren Sie dazu immer die Feststellbremse (siehe Bedienungsanleitung).

Sicher stehen, egal wo

Mit dem Wohnraumrollator stehen Sie sicher am Waschbecken oder der Arbeitsplatte. Der enorme Vorteil gegenüber einem klassischen Rollator, den viele auch im Haushalt nutzen, ist seine Form. Sie können direkt in dem Rollator stehen und sind so nur Millimeter vom Möbel entfernt. Bei einem Rollator wäre das Sitznetz im Weg und Sie müssten sich vornüberbeugen.

Im Bad können Sie selbst auf engstem Raum Ihr WC überfahren. Sowohl frontal als auch rückwärts, wie Sie es möchten.

Passt überall durch



Offt ist die geringe Breite von Türstöcken eine Herausforderung. Unser Wohnraumrollator ist mit nur 56 cm so schmal, dass er fast überall durchpasst. Sollte der Durchgang bei Ihnen zuhause trotzdem zu eng sein, nehmen Sie den Rollator einfach längs, denn dann ist er nur noch 51 cm breit.

Wenden in einem Zug

Ein Rollator, der ausschliesslich in der Wohnung genutzt wird, muss wendig sein und sich auf der Stelle drehen können. Deshalb lassen sich beim Wohnraumrollator von Saljol alle vier Räder um 360° drehen.

Wendigkeit einschränkbar für zusätzliche Sicherheit

Sollten Sie zum Geradeauslaufen mehr Sicherheit benötigen, können Sie die Hinterräder in der Richtung festzustellen. Dann bewegt sich der Wohnraumrollator so, wie Sie es vom klassischen Rollator kennen und dreht sich nicht mehr auf der Stelle.

Überwindet auch Schwellen

Müssen Sie kleine Türschwellen überwinden, um von einem Zimmer ins andere zu gelangen? Kein Problem. Die Reifen des Rollators sind weich und damit gut geeignet, um kleine Schwellen zu überwinden. Sie können auch im Wohnraumrollator stehend den Rahmen vorne leicht anheben.

Achtung: Der Wohnraumrollator ist nur für das Überfahren niedrigster Schwellen geeignet. Idealerweise ist die Wohnung eben oder barrierefrei mit Türschwellen-Ausgleichern ausgestattet.

Gehhilfe nach Verletzungen und für die Reha

Verletzungen an Beinen, wie beispielsweise an den Knien, können einen in jedem Alter treffen. Oft sind das Sportverletzungen oder Unfälle, die im Alltag passiert sind. Um den Reha-Aufenthalt oder auch das Leben zu Hause für die Genesungszeit zu erleichtern, ist ein Indoor Rollator eine gute Wahl. Die Beine werden mehr geschont als beim Laufen mit Krücken - auch das Sturzrisiko wird deutlich gemindert.

2. Stehend den Alltag daheim bewältigen strengt Sie an

Wie gern würde man sich manchmal beim Zubereiten des Essens hinsetzen – oder noch besser – sich sitzend von der Arbeitsplatte zum Herd, zum Kühlschrank und wieder zurück bewegen. Egal in



welchem Alter, Bequemlichkeit steht bei den meisten Menschen hoch im Kurs.

Wie gut, dass es hierfür den Saljol Wohnraumrollator gibt! Auf ihm können Sie dank des im Lieferumfang enthaltenen Sitzbretts mit weichem Filzkissen nicht nur bequem sitzen, sondern sich auch mit den Füßen schiebend (trippelnd) von A nach B schieben.

Sitzmöglichkeit immer dabei

Ob es ist, weil Sie nur kurz verschrauben wollen oder weil es Ihnen etwas schwindelig ist, eine Sitzmöglichkeit schnell griffbereit zu haben ist Gold wert. Denn nicht immer hat man die Kraft und Zeit, den nächsten Stuhl zu erreichen.

Beim Saljol Wohnraumrollator ist im Lieferumfang ein Sitzbrett enthalten, das mit bis zu 150 kg belastet werden kann. Um Ihnen das Sitzen noch angenehmer zu machen, ist ein Filzkissen mit dabei. Das Brett lässt sich leicht einlegen, entfernen oder hochklappen. Das Hochklappen gibt Ihnen noch mehr Beinfreiheit beim Laufen.

Im Sitzen trippeln erlaubt

Leider sind Standardrollatoren nicht dafür zugelassen, dass Sie sich auf ihnen sitzend durch Ihr Zuhause schieben. Denn darauf dürfen Sie nur sitzen, wenn die Feststellbremse angezogen ist. Zum Fortbewegen muss die Bremse gelöst werden und damit dürfen Sie nicht mehr auf dem Rollator sitzen.

Hier kommt der Wohnraumrollator von Saljol ins Spiel! Da er ideal für Innenräume ausgerichtet ist, ist das Trippeln – also im Sitzen fortbewegen – erlaubt. Sie können es sich auf dem Sitzbrett oder dem Polstersitz (Zubehör) bequem machen und sich mit den Füßen durch die Wohnung schieben.

Unterstützung bei Krankheiten wie Multiple Sklerose

Es gibt eine Vielzahl an Krankheiten, bei denen die motorischen Fähigkeiten eingeschränkt sind. Menschen, die beispielsweise an Multiple Sklerose erkrankt sind, verlieren immer mehr Kontrolle über ihre Muskeln und ihre motorischen Fähigkeiten. Die Muskelkraft schwindet und der Körper erschöpft schnell.

Ein Rollator für Innenräume hilft dabei, dass bei plötzlichem Kraftverlust eine Stütze und auch eine Sitzmöglichkeit parat sind. Der Vorteil gegenüber einem normalen Stuhl oder Hocker: Auch im Sitzen



ist man noch mobil und kann durch die Wohnung mit sehr geringem Kraftaufwand trippeln.

3. Ihre linke und rechte Hand sind nicht gleich gut einsetzbar

Ob alters- oder krankheitsbedingt oder weil Sie sich an einer Hand verletzt haben, manchmal stellen so einfache Dinge wie das Betätigen eines Bremsgriffs eine Herausforderung dar.

Wir von Saljol haben hier einen Schritt weitergedacht und dem Wohnraumrollator zwei Bremsmöglichkeiten eingebaut. Damit Sie ihn sicher und einfach bremsen bzw. in Parkposition bringen können.

Bremsen mit beiden Händen

Wie Sie es vielleicht vom klassischen Rollator kennen, hat der Wohnraumrollator zwei Bremsgriffe, links und rechts am Rahmen. Hier können Sie mit beiden Händen den Rollator gleichmässig abbremsen. Eine rutschhemmende Kork-TPE-Beschichtung und die extra langen Bremsgriffe sorgen dafür, dass die Griffe sicher in Ihren Händen liegen und Sie diese gut erreichen können.

Alternativ können Sie zum Abbremsen des Rollators auch den Bremsbügel nutzen. Mit beiden Händen können Sie ihn an jeder Position des Bügels greifen und nach oben ziehen.

Parkbremse einhändig oder beidhändig betätigen

Sie möchten Ihren Wohnungsrollator sicher abstellen und die Feststellbremse aktivieren? Das geht beim Wohnraumrollator von Saljol ganz einfach mit einer Hand.

Den Bremsbügel können Sie an jeder Seite des Bügels greifen und in Parkposition bringen. Eine Hand reicht dazu aus, den Bügel nach oben zum Feststellen zu ziehen oder nach unten zu drücken, um die Bremse zu lösen.

Alternativ können Sie zum Aktivieren der Feststellbremse auch die beiden Bremsgriffe betätigen. Einfach nach unten drücken und schon steht der Rollator fest.

Da Bremsbügel und Bremsgriffe des Saljol Wohnraumrollators ein gemeinsames Bremssystem haben, bewegt sich die jeweils andere Bremsmöglichkeit beim Benutzen mit.

4. Sie benötigen Hilfe beim Transportieren und Verstauen von Alltagsgegenständen



Das Essen ist zubereitet, alles steht in der Küche bereit. Doch leider steht Ihr Esstisch im Wohnzimmer und Sie müssen nun alles einzeln hinüberbalancieren. Die Wäsche liegt frisch gewaschen im Wäschekorb und wartet nur darauf, zusammengelegt zu werden? Am bequemsten erledigt sich das aber im Wohnzimmer?

In beiden Situationen stehen Sie vor der Herausforderung, dass Sie etwas von A nach B transportieren wollen und somit die Hände voll haben. Sie könnten stolpern, das Gleichgewicht verlieren oder nicht genug Energie haben, um mehrmals von Raum zu Raum zu laufen. Hier kommt die Wandelbarkeit des Wohnraumrollators voll zum Einsatz! Im Nu verwandelt er sich je nach Zubehör in einen Servierwagen, einen Rollschrank und vieles mehr.

Ein Rollator – viele Einsatzmöglichkeiten

Natürlich soll Ihnen ein Wohnraumrollator – wie es der Name verspricht – gute Dienste als Rollator leisten. Wenn er darüber hinaus aber noch anders einsetzbar ist, macht das einen echten Saljol Wohnraumrollator aus! Denn unser Wohnraumrollator ist so konzipiert, dass seine Funktion wandelbar ist.

Servierwagen, bequemer Sitz und Stauraum

- Machen Sie aus Ihrem Wohnraumrollator einen schicken und hochwertigen Servierwagen mit dem Echtholz-Tablett. Damit können Sie ein komplettes Menü von der Küche ins Esszimmer und direkt an den Tisch bringen. Es kann bis zu 20 kg belastet werden.
- Gönnen Sie sich einen noch bequemeren Sitz, dank Rückenkissen und Polstersitz. So eignet er sich auch als Gästestuhl, wenn Sie zu wenig Sitzmöglichkeiten haben.
- Erweitern Sie Ihren Wohnraumrollator zum rollbaren Stauraum für Bücher, Zeitschriften, Brille oder Kleider, wenn Sie den faltbaren Schrank oder die praktische Tasche einhängen. Nutzen Sie ihn so als Nachttisch oder Beistelltisch.

Das erhältliche Zubehör wird einfach eingehängt. Sie müssen nicht schrauben und benötigen kein Werkzeug.

So finden Sie die richtige Grösse für Ihren Saljol Wohnraumrollator

Unsere Wohnraumrollatoren gibt es in vier verschiedenen Grössen: WR43, WR50, WR53 und WR56. Die Zahlen 43, 50, 53 und 56 stehen für die Höhe des Sitzbrettes, also 43 cm, 50 cm, 53 cm und 56



cm. Die richtige Grösse herauszufinden, ist ganz leicht. Die passende Grösse des Alltagshelfers hängt von der Situation ab, in der Sie den Rollator am häufigsten nutzen. Wenn Sie ihn eher im Sitzen nutzen, ist Ihre Unterschenkellänge ausschlaggebend. Nutzen Sie den Rollator vor allem, um damit zu gehen und sich darauf abzustützen, ist die Körpergrösse relevant. Im Folgenden finden Sie Tipps, wie Sie die passende Grösse für Ihr neues Lieblingsgefährt ermitteln.

Je nachdem, wie sicher Sie sich beim Stehen oder Bücken fühlen, können Sie die Masse allein nehmen oder bitten am besten einen Angehörigen, einen Physiotherapeuten, eine Pflegekraft oder einen Sanitätshausmitarbeiter um Hilfe.

Hinweis: Beachten Sie bitte bei Nutzung des Zubehörs Polstersitz, dass sich die Sitzhöhe um 1,5 cm erhöht. Dann steigt die Höhe des WR 43 auf 44,5 cm, WR50 auf 51,5 cm, des WR53 auf 54,5 cm und des WR56 auf 57,5 cm.

1. Überwiegend zum Sitzen

Sie benötigen den Rollator, um sich im Sitzen mit den Füßen durch die Wohnung zu schieben (trippeln)? Dann messen Sie:

Ihre Unterschenkellänge (A)

Messen Sie den Abstand vom Boden bis zur Kniebeuge, am besten mit Schuhen, die Sie normalerweise zuhause tragen. Im Stehen müssen die Beine gestreckt sein, im Sitzen im rechten Winkel. Ihre kompletten Fusssohlen berühren den Boden.

Vergleichen Sie Ihre Messung mit der folgenden Tabelle und Sie finden den für Sie passenden Wohnraumrollator.

Unterschenkellänge (A)	< 48 cm	< 52 cm	> 52 cm	> 52 cm
Ihr passender Rollator	WR43	WR50	WR53	WR56

2. Überwiegend als Rollator

Sie möchten Ihren Rollator vorwiegend zum Schieben und Laufen in Ihrem Zuhause nutzen? Dann messen Sie:



Ihre Körpergrösse mit Schuhen (B)

Messen Sie Ihre gesamte Körpergrösse, am besten mit den Schuhen, die Sie normalerweise zuhause tragen.

Vergleichen Sie Ihre Messung mit der folgenden Tabelle und Sie finden den für Sie passenden Wohnraumrollator.

Körpergrösse (B)	135–155 cm	145–165 cm	150–180 cm	170–200 cm
Ihr passender Rollator	WR43	WR50	WR53	WR56

Deutsche Seniorenliga empfiehlt Wohnraumrollator

Die Deutsche Seniorenliga e.V., kurz DSL, empfiehlt in ihrem Ratgeber um Sturzunfälle zu vermeiden, die Nutzung eines Wohnraumrollators. In dem Ratgeber findet sich folgender Abschnitt:

«Wenn Ihnen das Gehen zunehmend schwerer fällt, bietet ein Rollator Halt und Sicherheit. Für die Nutzung in den eigenen vier Wänden ist ein Wohnraumrollator zu empfehlen, der wesentlich schmaler gebaut ist als ein Aussenrollator und deutlich kleinere Räder hat. So lässt er sich problemlos zu Hause nutzen.»

Achten Sie beim Kauf eines solchen Wohnraumrollators darauf, dass er ein sehr hohes Mass an Stabilität hat und sich möglichst auf der Stelle drehen lässt. Sie sollten im Rollator gehen und stehen können, so können die Hausarbeiten immer sicher verrichtet werden. Das geht besonders gut mit entsprechendem Zubehör wie einem grossen Tablett und/oder einem Korb.

Eine Sitzgelegenheit, mit der man auch mal trippeln statt nur gehen kann, bietet zusätzliche Sicherheit in schwachen Momenten. Ideal, wenn Sie sich von allen Seiten festhalten und auf Ihren Wohnraumrollator wie auf einen fahrbaren Handlauf stützen können.»

Saljol steht für Qualität und Sicherheit

- Der Wohnraumrollator wird aus stabilem Stahl hergestellt und mit hochwertigem griffigem Material pulverbeschichtet. Auf das 38 mm Stahlrohr (übrigens das deutsche Norm Mass für Handläufe) können Sie sich in allen Lebenslagen stützen.
- Die Räder haben Laufflächen aus rutschhemmenden TPE mit einem Durchmesser von 125



mm. Sie kommen von dem finnischen Medizinprodukte-Hersteller Manner und sind von bester Qualität; auch geprüft für den Einsatz in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

- Unsere Sicherheitsstandards entsprechen der Medizinprodukteverordnung (MDR)
- Der Saljol Wohnraumrollator ist durch ein Europäisches Patent geschützt und ist als Deutsches Gebrauchsmuster registriert.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wieviele Jahre Garantie bekomme ich auf den Wohnraumrollator von Saljol?

Saljol gibt, zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, eine 2-jährige Garantieleistung auf Produktions- oder Materialfehler. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Saljol Garantie von 2 Jahren auf 4 Jahre zu verlängern.

Wo finde ich die Garantieverlängerung?

Sie können die Saljol Garantie auf Produktions- oder Materialfehler, von 2 Jahren auf 4 Jahre verlängern. Registrieren Sie sich dafür einfach mit Ihrem Namen und der Seriennummer des Rollators auf unserer [Webseite](#) für die Garantieverlängerung. Die Seriennummer finden Sie auf dem Rahmen Ihres Rollators, schauen Sie sich dafür das Bild auf der Seite für die Garantieverlängerung an.

Weshalb ist der Wohnraumrollator nicht faltbar?

Der Saljol Wohnraumrollator ist speziell auf die Vorbeugung von Stürzen ausgelegt. In der Regel wird der Rollator nur von einer Person genutzt und nur selten auf Reisen, z.B. im Auto, mitgenommen. Ein Faltmechanismus beeinträchtigt immer die Stabilität.

Durch diese Bauart können wir sogar das sonst unerwünschte «Trippeln» auf dem Rollator ermöglichen. Sie können sich mit dem Saljol Wohnraumrollator also sogar im Sitzen mit vorsichtigem Abstoßen vom Boden fortbewegen.

Kann sich der Rahmen des Wohnraumrollators verziehen bzw. kann er wackeln?

Durch den starren, stählernen Multifunktionsrahmen ist der Saljol Wohnraumrollator in jeder Hinsicht sicher, stabil und verwindungssteif. [Der deutsche Seniorenmeister 2017 im Turnen Frank Grob hat](#)



[unseren Wohnraumrollator auf Stabilität mit Turnübungen getestet.](#)

Kann ich mit dem Wohnraumrollator wirklich durch einen Türstock fahren, wenn dieser nur 53 cm breit ist?

Ja, das können Sie. Der Wohnraumrollator ist so stabil, dass Sie ihn von jeder Seite aus fahren können. Das heisst, bei einem Durchgang der schmaler als 56 cm ist, fahren Sie den Rollator einfach quer. So ist der Wohnraumrollator dann sogar nur 51 cm breit, und damit wohl der schmalste Wohnraumrollator der Welt.

Wieviel Kilogramm stützt der Wohnraumrollator?

Der Saljol Wohnraumrollator ist bis 150 kg sicher und stabil belastbar.

Welche Rahmengrösse ist für mich die Richtige?

Der Saljol Wohnraumrollator ist in 4 Grössen erhältlich. Welcher für Sie der Richtige ist, ermitteln Sie ganz einfach anhand Ihrer Körpergrösse:

Grösse WR43: Griffhöhe 78 cm, empfohlene Körpergrösse 1.35 m – 1.55 m

Grösse WR50: Griffhöhe 80 cm, empfohlene Körpergrösse 1.45 m – 1.65 m

Grösse WR53: Griffhöhe 86 cm, empfohlene Körpergrösse 1.50 m – 1.80 m

Grösse WR56: Griffhöhe 92 cm, empfohlene Körpergrösse 1.70 m – 2.00 m

Wie kann ich sicher am Wohnraumrollator gehen, wenn das Tablett aufgelegt ist?

Legen Sie das Tablett sicher auf die obere Rohrkonstruktion. Nun können Sie sich auf dem Tabletrand oder auf einer Kombination aus Tablett und Haltegriff abstützen und so den Rollator bewegen. Viele Nutzer können bei dieser Möglichkeit die Handbremse weiterhin betätigen.

Falls Sie sich dennoch unsicher fühlen, können Sie das Tablett auch auf die untere Querstange des Rollators aufstecken. Und schon haben Sie den oberen Rahmen wieder frei für Ihre Hände und



können trotzdem Ihren Teller sicher zum Tisch befördern.

Kann ich auf dem Wohnraumrollator sitzen?

Der Saljol Wohnraumrollator lädt Sie genau dazu ein. Er ist der einzige Rollator, mit dem Sie sich sogar sturzfrei im Sitzen fortbewegen können. Dafür legen Sie das mitgelieferte Echtholz-Sitzbrett auf die untere Querstange Ihres Rollators. Dann nur noch die Parkbremse feststellen. Schon können Sie sich auf das Sitzbrett setzen.

[Zum Fortbewegen im Sitzen lösen Sie die Parkbremse wieder und stossen sich vorsichtig vom Boden ab. Schon können Sie auf dem Rollator durch Ihre Wohnung «trippeln».](#)

Für mehr Bewegungsfreiheit beim Laufen im Wohnraumrollator, klappen Sie das Sitzbrett nach vorne oder nehmen Sie es einfach heraus.

Kann ich mit dem Wohnraumrollator auch draussen fahren?

Die Räder des Wohnraumrollators sind für glatte Flächen und Terrassen geeignet. Eine Überwindung höherer Barrieren, wie zum Beispiel Bordsteinkanten, oder die Nutzung auf sandigem, holprigen Untergrund ist nicht ideal und unsicher.

Kann ich den Wohnraumrollator auch unter der Dusche nutzen?

Der Saljol Wohnraumrollator wurde für den Wohnraum geschaffen. Er eignet sich ideal, um auch in engen Badezimmern den sicheren Weg bis zur Dusche zu gehen.

Falls Sie den Rollator im Nassbereich verwenden, trocknen Sie nach dem Gebrauch schnellstmöglich alle Flüssigkeiten ab.

Kann ich den Wohnraumrollator als Toilettenstützgestell nutzen?

Jederzeit und ideal, er kann sowohl vorwärts als auch rückwärts beim Überfahren der Toilette eingesetzt werden. Er bietet somit Sicherheit auf dem Weg zur Toilette und dient Ihnen als Stützhilfe beim Hinsetzen und Aufstehen.

Kann ich die Feststellbremse bedienen, wenn ich nur eine bewegliche Hand



habe?

Der Saljol Wohnraumrollator hat extra dafür einen Bremsbügel. Sie können die Bremse an jeder Seite des Bügels mit einer oder beiden Händen betätigen.

Ist es möglich, dass nur die vorderen Räder des Wohnraumrollators lenkbar sind?

Unser Indoor Rollator verfügt über eine Richtungsarretierung. Diese kann mittels des Fusspedals zugeschaltet werden. Dadurch können Sie die hinteren Räder soweit fixieren, dass diese nur noch gerade rollen. Dieses Gefühl von Sicherheit kennen Sie bestimmt von Ihrem normalen Rollator.

Kann ich die Bremse selbst nachstellen?

Ja, Sie können die Bremsen selbst nachstellen. Bitte beachten Sie dafür die Hinweise in der Bedienungsanleitung, unter dem Punkt 5.5.4 Wohnraumrollator mit Handbremse. Sollten Sie unsicher sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an unseren Kundenservice.

Welches Zubehör gibt es?

Für den Saljol Wohnraumrollator gibt es eine grosse Auswahl an Zubehör. So können Sie den Rollator als Trippelstuhl, Servierwagen, Nachtschrank, Wäschewagen und noch vieles mehr nutzen. Fragen Sie Ihren Sanitätsfachhändler oder schauen Sie sich das Zubehör auf unserer Webseite Indoor Rollator an.



Produktvariationen

SKU	Sitzhöhe	Farbe	Preis
4058789015858	53-cm	champagne-gold-gold	CHF 579.00
4058789015810	53-cm	velvet-grey-grau	CHF 579.00
4058789015872	43-cm	champagne-gold-gold	CHF 579.00
4058789015834	43-cm	velvet-grey-grau	CHF 579.00
4058789015841	50-cm	champagne-gold-gold	CHF 579.00
4058789015803	50-cm	velvet-grey-grau	CHF 579.00
4058789015865	56-cm	champagne-gold-gold	CHF 579.00
4058789015827	56-cm	velvet-grey-grau	CHF 579.00